



ALリムーバー

ALGINATE IMPRESSION TRAY CLEANER

# ALリムーバー

アルギン酸塩印象材用清掃材

トレー清掃を「溶かして取る」から、  
発想の転換＝「縮めて剥ぎ取る」方式のトレークリーナーです。  
今までに比べて素早く処理ができて、トレーも長持ち。  
沈殿物も残らないので、とっても清潔です。



スピーディー  
手間いらず

トレーに  
やさしい

液汚れ無く  
清潔

サンエス石膏株式会社

SAN ESU GYPSUM CO.,LTD.


# 縮めて剥がすトレークリーナー

## 特長

1 処理時間を大幅に短縮します。  
(片顎網トレードで最短15分です。)

2 アルジネート印象材を溶かさず  
収縮させ剥がします。

トレードをブラシなどで擦ったり、長時間浸漬する必要がないので、  
トレードを傷めにくくなります。

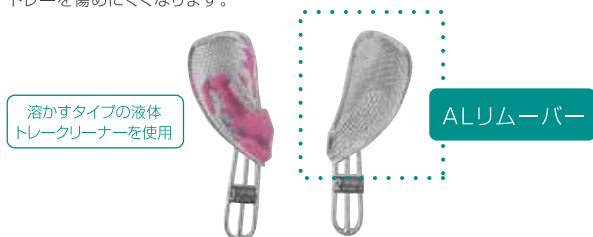

●印象トレード処理後、指で軽く印象材を取り除いた状態

3 液が汚れにくく、より清潔にご使用いただけます。



●印象トレード12個処理後の液体

4 抗菌性能があります。

5 減容ボトルを使用し、環境にも配慮しています。

## 用途

トレードからのアルジネート印象材の除去


### 標準処理時間

	標準処理時間	サンエス ニューアルジスター
片顎網トレード	15分～30分	15分
全顎網トレード	30分～60分	30分
片顎穴あきトレード	45分～90分	45分
全顎穴あきトレード	60分～120分	60分
片顎穴無しトレード	75分～150分	75分
全顎穴無しトレード	90分～180分	90分

\*印象材の種類や温度などの使用条件により変動します。

\*石膏を混練するペーストタイプの印象材の場合、片顎網トレードなら10分が目安です。

## 使用方法

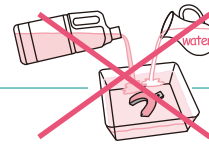

1 原液のままご使用下さい。  
水で薄めずにご使用して下さい。

2 事前にアルジネート印象材をトレードから除去(前処理)  
する必要はありません。そのまま投入して下さい。

3 標準処理時間が過ぎましたらトレードを液から  
取り出して下さい。

4 速やかにアルジネート印象材を外した後、  
トレードは流水中で洗浄して下さい。

5 液中に白い沈殿物が発生したり、液全体が白く濁ったら、  
新しい液と交換して下さい。

\*一晩中など、毎回長時間トレードを浸漬すると液の寿命が短くなります。

\*トレードの種類や状態により、トレードが変色したり、腐食することがあります。

\*40℃以上の液で処理すると、トレードが変色しやすくなります。

\*15℃以下の液で処理すると、効果が遅くなりますので常温でご使用ください。

\*処理能力の目安は、ALリムーバー2ℓあたり片顎で約660個、全顎で約300個です。

## 包装

2,000ml・ポリ容器×4/PC

\*空き容器は折りたたんで廃棄できます。

## 使用上の注意事項

1 本品は弱酸性の薬剤です。

2 万一、飲み込んだ場合は、多量の水を飲み、  
吐いた後医師の診断を受けること。

3 万一、目に入った場合は、すぐに大量の流水で洗浄し、  
眼科医の診断を受けること。

4 皮膚に付着した場合は、大量の流水で  
良く洗い落とすこと。

5 詳細な内容が必要な場合は、MSDSをご請求下さい。



大阪本社 | 〒564-0063 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F  
大阪営業所 | TEL(06)6339-0870(代) FAX(06)6339-0871

東京営業所 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-6 福利久ビル5F  
TEL.03-5283-6201 FAX.03-5283-6205

中部営業所 | 〒489-0983 瀬戸市苗場町113  
TEL(0561)82-9185(代) FAX(0561)85-4179

福岡営業所 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-4-17 第6岡部ビル6F  
TEL(092)413-5220(代) FAX(092)413-5222

URL : <http://www.san-esugypsum.co.jp>  
E-mail : [headquarter@san-esugypsum.co.jp](mailto:headquarter@san-esugypsum.co.jp)

サンエス石膏

販売元:サンエス石膏株式会社

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ

H000000M