

兼松式合丁(ポスト)撤去鉗子

一般医療機器 歯科用起子及び剥離子 届出番号 13B3X00365000401

本鉗子は継続歯の冠部が破折して、根面上に合丁(ポスト)が突出している場合に、これを抜去するのに用います。
#1(外鉗子)、#2(内鉗子) 2本セット
#3(小臼歯用外鉗子) 根面板 別売

特徴


1. 反動的ですから無痛です。
2. 時間がかからない。
3. 使用法が簡単です。

用途

1. 合丁(ポスト)の抜去 : #1. #2を使用
2. 継続歯の除去 : #1を使用
3. メタルコアの除去 : #2を使用

使用法

- ① 歯冠部が破折してポストが根面上に残っている場合は、まず左手で#2号鉗子(内鉗子)を持ち、根面に先端を接触させてポストを把持する。(図1)
根面を破折する心配の有る場合は、根面と#2号鉗子との間に根面保護板を入れると根面の破折を防ぐ事が出来ます。
- ② #1号鉗子(外鉗子)を右手に持ち、根面と#2号鉗子の間に入れ、クサビの作用をさせて少し力を入れると簡単にポストが緩み除去出来ます。(図2)
小臼歯の場合、#1だと使いにくい場合があるので、頭部と、ハンドルが屈曲した、#3が便利です。
- ③ 継続歯をそのままの状態に除去したい時は、#1号鉗子を根面と歯冠との境界部に適合させ徐々に力を加えれば、殆ど歯冠部を傷つけずにそのまま除去出来ます。(図3)

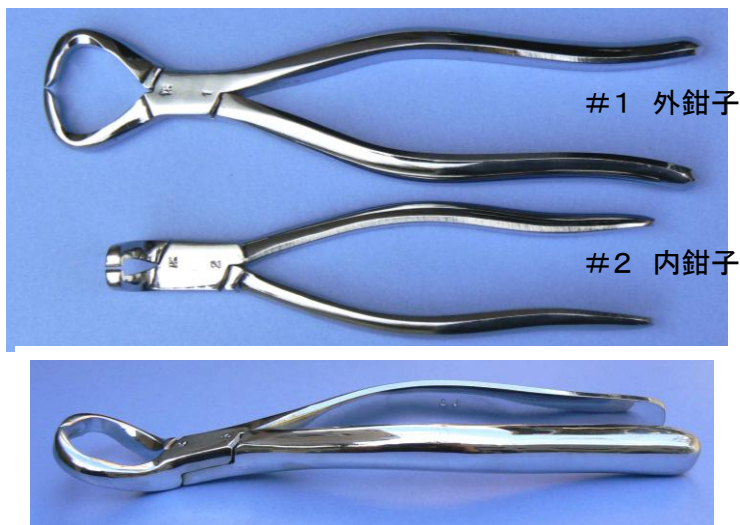

#1 外鉗子

#2 内鉗子



#3 外鉗子
(小臼歯用)

図1 #2でポストを把持



根面保護板

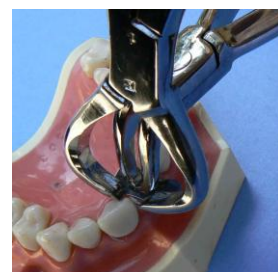


図2 根面と#2の間に#1でクサビを入れる



図3 #1で継続歯を除去

(有)木村鉗子製作所

一般医療機器 製造販売業 13B3X00365

東京都墨田区向島 1-18-9
TEL.FAX 03-3623-1232
E-mail Kimura.kanshi@nifty.com
<http://www.kimura-kanshi.com/>