


## すべての入れ歯に使えます。

保険の入れ歯はもちろん！今、話題の金属のバネを使わないノンクラスプの入れ歯、金属・シリコンの入れ歯、マウスガードなど

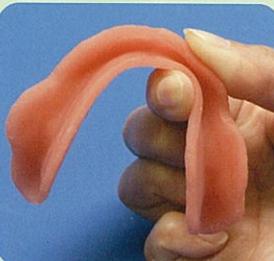


ノンクラスプの入れ歯



シリコンの入れ歯



金属の入れ歯

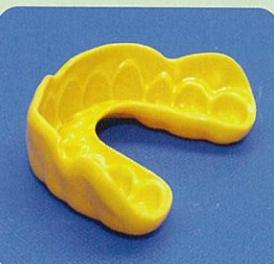

マウスガード

## 入れ歯のメンテナンス

毎日のお手入れを心がけましょう

入れ歯のメンテナンスで1番重要なのは洗浄です！常に清潔に保つように心がけ、1日1回は必ず入れ歯を取り外して洗いましょう。

入れ歯の裏側とバネの裏側には食べカスや歯垢が付着しています。汚れがこびり付いた入れ歯を一気にきれいにしようとすると入れ歯の素材を傷める原因となります。



## Q&A

### 入れ歯を汚れたままにしておくとどうなりますか？

汚れの付いた入れ歯をつけていると、歯茎が炎症（歯肉炎）を起こしたり、口内の細菌が原因で肺炎を引き起こすことがあります。部分入れ歯の場合は、金具のかかっている歯に汚れがたまって虫歯や歯肉炎・歯周病を引き起こす原因となります。

### 洗浄剤をどのくらいの頻度で、どの位つけておけばいいですか？

歯磨きと同様に行なうのが理想的ですが、日中はブラッシングで済ませ、就寝前は入れ歯をブラッシングし、その後洗浄液に朝までつけておくと効果的です。

### ブラッシング、入れ歯洗浄剤では落ちない汚れはどうしたらいいのでしょうか？

入れ歯についたタバコのヤニ、茶渋などはブラシや洗浄剤でもなかなか落ちにくいものです。やすりなどで無理に取ろうとすると、入れ歯がキズついたり、破損する原因になります。頑固な汚れが付いた時は、歯科医院で取り除いてもらいましょう。



患者さん価格

**950円(税別)**

容量:28錠 形状:泡発錠

製造販売元  
東伸洋行株式会社

〒950-2074 新潟市西区真砂3-23-2  
TEL:025-233-1347 FAX:025-265-2567  
URL <http://www.tong-sing.co.jp>

FFE04

—漂白剤が入っていない—

## 入れ歯洗浄剤

天然植物酵素が入れ歯にやさしく汚れをおとす **ダブル酵素**

# 洗ってクリア



洗浄成分に大豆・トウモロコシ・パパイヤ・ココナッツ配合

快適な食生活  
楽しい会話  
そして自然な笑顔



## 入れ歯と環境にやさしい

入れ歯を劣化させ、口腔粘膜にも悪影響を及ぼす可能性の高い酸化漂白剤を一切含みません。さらに中性(pH6~pH7)のため、全ての入れ歯に安心してご使用頂けます。また、天然植物酵素を原料としているため、洗浄成分は自然に分解され、地球環境にやさしい洗浄剤です。



優しい


## 優れた除菌力

発泡成分と天然植物酵素を原料とした洗浄力に除菌効果をプラスしました。口内炎や口腔カンジタ症などの原因となるデンチャーブラーカーを効果的に除去。雑菌も除去し、口臭・歯ぐきへの悪影響を予防します。



除菌力

除菌率 99.9%  
生菌数測定結果

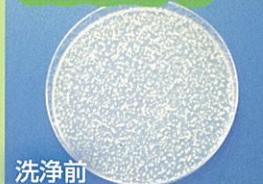

洗浄前



洗浄後

## 洗つてクリアの

## 天然植物酵素ダブル配合

タンパク質・脂肪分解酵素で汚れを分解除去することで、細菌の増加を抑えることができます。洗浄成分は、大豆・トウモロコシ・パパイヤ・ココナッツの天然植物を使用。



洗浄力



## 再付着防止

一度取り除いた汚れが再度入れ歯に付着する事を防ぎます。



付着防止

4つの力

検体：入れ歯洗浄剤 洗つてクリア

対照：滅菌精製水 保存温度：25±1°C

結果：6時間後にカンジタ菌の生育が確認されなかった

試験菌	洗浄前	洗浄後
カンジタ	$2.4 \times 10^5$	生育菌確認出来ず

自社測定値