



歯科切削加工用セラミックス

PREMIUM ZIRCONIA

ベレッツァ プレミアム ジルコニア

お客様の
声から生まれた新色
MTシリーズ
追加
全5色



“らしさ”を追求した カラーバリエーション

ベレッツァ プレミアム ジルコニアは、
「より美しく、より機能的で患者様にも喜んでいただける
補綴物の製作」を実現していただくために開発された
CAD/CAM切削加工用ジルコニアディスクです。



MTシリーズカラーバリエーション



MT-A0



MT-A1



MT-A2



MT-A3




MT-A3.5

より簡単に、より美しく。

MTシリーズはお客様の声から生まれたピンク系の新しいカラーラインナップです。染色せずに一定の色を表現できるため、作業ステップの簡易化や作業時間短縮につながります。また、ステインテクニックなどと合わせる事で、より自然な仕上がりを実現できます。

焼成スケジュール

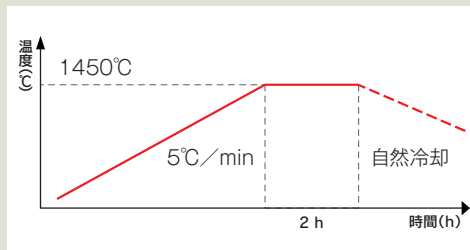

室温から1450°Cまで毎分5°Cで昇温させ、1450°Cで2時間保持した後、室温まで徐冷(自然放冷)してください。ロングスパンのブリッジなど大きい症例では毎分3°C以下で昇温してください。

物性

シェード	物性
収縮率(%)	約 20
焼成温度(°C)	1,450
ビッカース硬度 ^{※1}	1,290
曲げ強度(MPa) ^{※2}	1,100
焼結密度(g/cm ³) ^{※1}	6.09

※1 密度・硬度・曲げ強度は焼結後の数値です
 ※2 曲げ強度 ISO 6872:2008に基づく

サイズ / 標準価格(税別)

厚み	標準価格
14mm	33,000円
18mm	36,000円
22mm	39,000円
26mm	41,000円

●販売名:ベレッツァ プレミアム ジルコニア ●一般的名称:歯科切削加工用セラミックス ●分類:管理医療機器
 ●認証番号:225AFBZX0023000 ※ベレッツァ プレミアム ジルコニアは、東ソー株式会社製の原料を使用しています。

関連製品



歯科切削加工用レジン材料
PMMA DISK
 ベレッツァ PMMAディスク

最終補綴物が入るまで装着し、テンポラリークラウンとして使用できるCAD/CAM切削加工用レジンディスクです。

色 調: ライトアイボリー、ミディアムアイボリー

サイズ: φ98×20mm
 数量: 1枚入
 標準価格: 4,800円(税別)

●販売名:ベレッツァ PMMAディスク
 ●一般的名称:歯科切削加工用レジン材料
 ●分類:管理医療機器
 ●認証番号:225AFBZX00110000



歯科用キャスティングワックス
WAX DISK
 ベレッツァ WAXディスク

優れた切削性があり、焼却時の残渣も少ないCAD/CAM切削加工用ワックスディスクです。

使用埋没材: リン酸塩系、クリストバライト系

サイズ: φ98×20mm
 数量: 1枚入
 標準価格: 2,800円(税別)

●販売名:ベレッツァ WAXディスク
 ●一般的名称:歯科用キャスティングワックス
 ●分類:一般医療機器
 ●届出番号:26B1X10008000039

●カタログに記載の商品及び色見本などの色調は、印刷のため実物とは異なります。 ●仕様および外観は、製品改良のため、予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
 ●価格は、2016年11月現在のものです。 ●ご使用に際しましては、添付文書を必ずお読みください。

製造販売元 **株式会社 ニッシン**
 京都府亀岡市旭町樋ノ口88

販売元 **株式会社 アイキャスト**
 〒604-0847
 京都市中京区烏丸通り二条下る秋野々町513番地 京都第一生命泉屋ビル8階
 TEL 075-257-7270 FAX 075-257-7271
www.i-cast.jp