

KDF

業界初[※]

ペーストタイプ 硬質リライニング材

※2019年2月時点、
国内で販売されている義歯床用硬質裏装材を
対象とした自社調査で、業界初のペーストタイプ

DHフィットリライナー



DHフィットリライナー基本セット 標準価格 ¥6,000-

DHフィットリライナー本材 55g入り/1本
DHフィットリライナー専用プライマー 7ml入り/1本

- DHフィットリライナー
本材単品 4本入り ¥13,500-
- DHフィットリライナー専用プライマー
単品 30ml/1本 ¥2,500-



DENKEN-HIGHDENTAL Co.,Ltd.

業界初

ペーストタイプ
硬質リライニング材

DHフィットリライナー

1 時間の短縮

計量・混和の手間がいないペーストタイプです。

当社、粉・液レジンの場合

粉・液の計量 30秒 混和 10秒 盛り上げ 20秒 **60秒**

盛り上げ 20秒 **20秒! 大幅に短縮!**
DHフィットリライナー

2 良好な操作性

筋圧形成が容易な粘度が持続し、
硬化後の研磨も容易です。
(盛り上げから最終硬化まで5分間)



3 携帯性

ペーストカートリッジ式なので持ち運びもラクラク。
訪問診療にも適しています。



4 無駄が少なく経済的

必要な量を直接盛り上げるため、廃棄ロスが減少します。

使用方法



カーバイトバーにて新鮮面を出します。



専用プライマーを薄く均一に塗布し、乾燥させます。




ペーストを盛り上げます。



通法に従い研磨します。



トリミング、形態修正を行います。

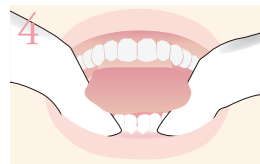

筋圧形成後、口腔内で硬化させます。

7 洗浄

色調



母材の色と調和するクリアピンク

接着可能な材料

- ・アクリルレジン床
- ・アクリジェット
- ・アクリショット
- ・ポリカーボネイト床

使用量の目安は、本材1本で…

下顎総義歯 **7~8床分**です。

・DHミキシングチップ
32本入り ¥2,300-



・DHディスペンサーII
1台 ¥4,800-



販売名: DHフィットリライナー
販売名: DHミキシングチップ
販売名: DHディスペンサーII

一般的名称: 義歯床用硬質裏装材
一般的名称: 歯科用練成器具
一般的名称: 歯科用練成器具

管理医療機器 認証番号: 229AHBZX00004000
一般医療機器 届出番号: 26B2X10018M00102
一般医療機器 届出番号: 26B2X10018M00101

※外観・仕様については予告なしに変更する場合があります。

お問い合わせは

西日本支店 東日本営業所 九州営業所

TEL. 075-571-1000

TEL. 03-3969-8000

TEL. 092-710-5360

製造販売元

製造販売許可番号 26B2X10018



デンケン・ハイデンタル株式会社

http://www.kdf.co.jp/

Email denken@kdf.co.jp

エアウェルグループ