

# アグサ TBS錠

塩素系除菌剤

## 〔院内環境〕+〔石膏模型〕の感染対策 塩素系除菌剤

オプション追加キャンペーンセール

### Aセット

#### 歯科医院セット



- アグサTBS錠 100錠入×1……………1箱
- アグサTBS錠 1L溶液調製ボトル……………1本
- TBSパッファ(塩素中和剤) 130mL×1……………1本

### Bセット

#### 院内環境セット



- アグサTBS錠 100錠入×1……………1箱
- アグサTBS錠 1L溶液調製ボトル……………1本
- アグサTBS錠 500mL溶液調製スプレーボトル……………1本

### Cセット

#### 歯科技工所セット



- アグサTBS錠 100錠入×1……………1箱
- 石膏模型 10分間浸漬容器(大)……………1個
- 石膏模型 60分間保湿容器(小)(かご付) 1個
- TBSパッファ(塩素中和剤) 130mL×1……………1本

## 特長

速効性

多用途に  
使用可能

低コスト

セット価格

各3,600円(税別)

お得なお試しパックがついてお値段据置き!

キャンペーン期間

2019年 2月21日～5月31日

### ■使用方法

水1Lに本剤1錠を投入する。

→次亜塩素酸溶液となり除菌効果を発揮します!

(有効塩素濃度1,000ppm、pH約5.5 微酸性、溶解時間5分)

- ご使用に際しましては、製品説明書をよく読んでお使い下さい。
- 危険ですので酸類(塩素ガスが発生)、アルカリ類(危険物質の生成)と混ぜないで下さい。
- 本剤は次亜塩素酸系除菌剤で金属腐食性がありますので金属、金属パイプ等に使用後は拭き取る、水を十分に流す等の防錆処置して下さい。

### ■アグサTBS錠仕様

主成分	ジクロロイソシアヌル酸ナトリウム
使用期限	箱及びラベルに記載(製造日より5年間)

### アグサTBS錠中和剤 TBSパッファ

「アグサTBS錠」の塩素中和剤です!

TBS原液を使用(練和・浸漬)した石膏模型により、まれに鑄造物(金属)の変色、複模型用印象材(シリコーン印象材)の硬化不良等を起こすことがあります。

本剤を噴霧するだけで石膏表面の塩素を中和し、塩素による諸問題を解決いたします。

#### 特長

- 塩素臭を簡単に除去します。
- 塩素による鑄造物の変色を防ぎます。
- 塩素による複模型用シリコーン印象材の硬化不良を防ぎます。

#### 〈使用方法〉

石膏模型全体に直接噴霧してください。

※ご使用に際しましては製品ラベルに表示の説明書をお読み下さい。



包装130ml×2本(スプレーボトル)  
3,600円(税別)

輸入・製造販売業者

**アグサジャパン株式会社**

〒540-0004 大阪市中央区玉造1丁目2番34号  
TEL 06-6768-6344 06-6762-8022(営業部)  
FAX 06-6768-6368 06-6762-8023(営業部)

アグサジャパン ホームページ <https://www.agsa.co.jp>

■お問い合わせ・ご用命は

# アグサの感染予防対策


ご利用状況に合わせて3つのパターンからお選びください。今だけの限定品です！

## Aセット

### 歯科医院 石膏模型の除菌



水1Lに「アグサTBS錠」1錠を投入  
(1,000ppmの「TBS原液」の出来上がり!)

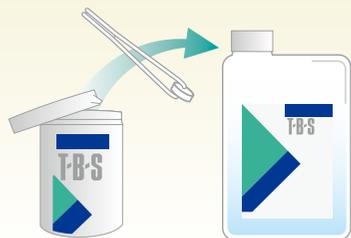

TBS原液で  
練和した石膏泥を  
印象体へ流し込む



※必要に応じて除菌した石  
膏模型に「TBSパuffa」  
を噴霧して下さい。


除菌された石膏模型

## Bセット

### 院内環境の除菌 ノロウイルスの除菌



水1Lに「アグサTBS錠」1錠を投入  
(1,000ppmの「TBS原液」の出来上がり!)

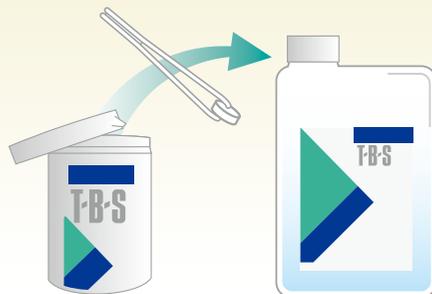

#### ◎ユニット、チェアサイド、キャビネット 床等の除菌

希釈した500ppmのTBS水溶液で拭く。  
(希釈割合 TBS原液:水=1:1)




#### ◎石膏トラップ、スピットン、排水パイプ 流し台、トイレ等の除菌

希釈した400ppmのTBS水溶液を流し、  
30分後に水を流す。  
(希釈割合 TBS原液:水=2:3)

#### ◎シャーレ、薬瓶等の除菌

洗浄後、希釈した100ppmの  
TBS水溶液に60分間浸漬する。  
(希釈割合 TBS原液:水=1:9)

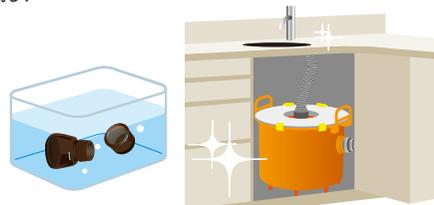

#### ◎ノロウイルスの除菌

##### ●手すり、ドアノブ、水道の蛇口等の除菌

希釈した200ppmのTBS水溶液で浸すように  
ペーパータオル等で拭く。  
(希釈割合 TBS原液:水=1:4)

##### ●トイレの除菌

希釈した300ppm以上のTBS水溶液で  
浸すようにペーパータオル等で拭く。  
(希釈割合 TBS原液:水=1:2)





## Cセット

### 歯科技工所 石膏模型の除菌



水1Lに「アグサTBS錠」1錠を投入  
(1,000ppmの「TBS原液」の出来上がり!)

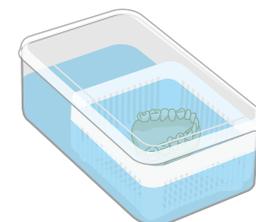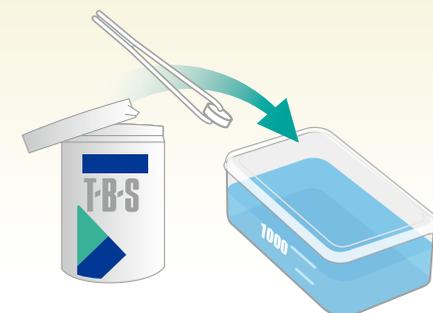

10分間浸漬



60分間保管



※必要に応じて除菌した石  
膏模型に「TBSパuffa」  
を噴霧して下さい。

除菌終了