



DISINFECTING AND
SECURING ACCURACY DOSE
FOR DENTAL IMPRESSION

CHLOR ANCHOR

クロルアンカー
歯科印象用除菌固定剤 錠剤

目に見えないからこそ、徹底しなくてはならない衛生対策。

クロルアンカーを使ったスタンダードプリコーションの実践により、院内衛生管理に役立ちます。

印象模型は補綴物製作のベースとなる、いわば設計図です。

もし設計図の段階で誤差が生じると、後々の工程に大きな影響を与えてしまいます。

クロルアンカーは印象体の寸法変化を安定させます。



タブレット
タイプ

塩素濃度
1300ppm

印象体の
寸法安定


サンエス石膏株式会社

SAN ESU GYPSUM CO.,LTD.

お手軽な除菌固定剤

特長

- 1 取り扱いが簡単です。
タブレットタイプで、水に入れると発泡して溶けます。
直接手に触れることなく水に投入できます。
- 2 高い塩素濃度による除菌力
1ℓの水に溶かすと、塩素濃度が1300ppmになります。
- 3 印象体固定効果について
3時間程度の浸漬でも寸法は安定しています。

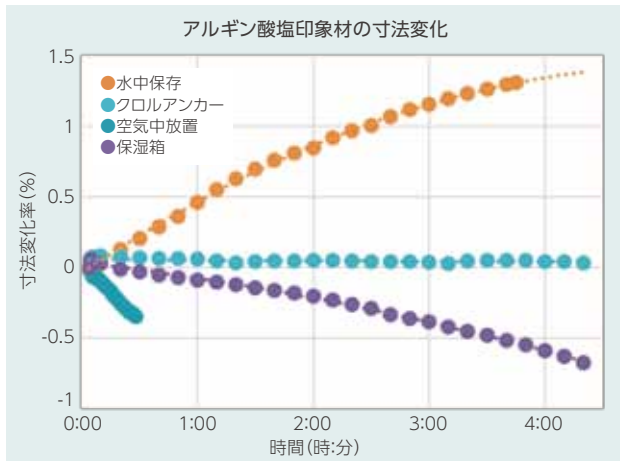

用途

アルギン酸塩印象材の除菌及び寸法精度固定

使用方法

- 1 樹脂の容器に水1ℓに対し、12g(1包)を入れます。
※かき混ぜるとより速く溶解します。
- 2 流水で洗浄した印象体を溶液に浸漬します。
- 3 15分～1時間後に印象体を取り出し、水洗してください。
※印象体の汚れ具合に応じて浸漬時間を調整してください。
- 4 余分な水分を除去して、石膏を注入してください。
※注入前に【スムーズメーカー】で処理するとより滑沢な石膏模型を得られます。

包装

錠剤 12g×30包/箱

使用上の注意事項

- 1 本剤は歯科医療従事者が使用してください。
- 2 本剤は食べ物ではありません。飲み込むと有害です。誤って飲み込んだ場合は無理に吐かせず、口をよくすすいでください。気分が悪い時は、医師の診断を受けてください。
- 3 錠剤に素手で触れない様に使用してください。本剤が皮膚に付着した場合は、大量の流水で洗ってください。皮膚刺激や発疹がある場合は専門医の診断を受けてください。目に入った場合には、大量の流水でよく洗い、眼科医の診断を受けてください。
- 4 他の製剤(酸・アルカリ・脱塩素剤・油脂類・他の塩素系薬剤等)と直接接触・混合しないでください。スムーズメーカーの原液とは接触・混合しないようにしてください。
- 5 本剤は、説明書に記載の用途以外には使用しないでください。
- 6 歯科医療従事者以外が触れない場所に保管してください。

関連商品



スムーズメーカー 歯科印象用滑沢剤
200gボトル

販売元:サンエス石膏株式会社

サンエス石膏株式会社

大阪本社 | 〒564-0063 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F
大阪営業所 | TEL(06)6339-0870(代) FAX(06)6339-0871

東京営業所 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-6 福利久ビル5F
TEL(03)5283-6201 FAX(03)5283-6205

中部営業所 | 〒489-0983 瀬戸市苗場町113
TEL(0561)82-9185(代) FAX(0561)85-4179

福岡営業所 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-4-17 第6岡部ビル6F
TEL(092)413-5220(代) FAX(092)413-5222

URL : <http://www.san-esugypsum.co.jp>
E-mail : headquarter@san-esugypsum.co.jp

サンエス石膏

検索

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ