



コーヌス プライヤー(ダイヤ付)

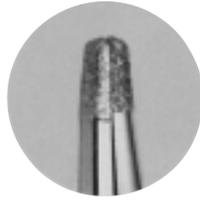

No.1




No.1臼歯用

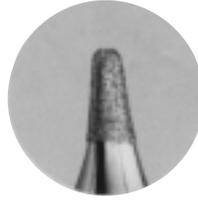

No.3前歯用

先端にダイヤモンドが着いているので、同種の鉗子より保持力が強化され、内冠と外冠との撤去作業が容易に行えます。

医療機器届出番号 13B3X00365000601

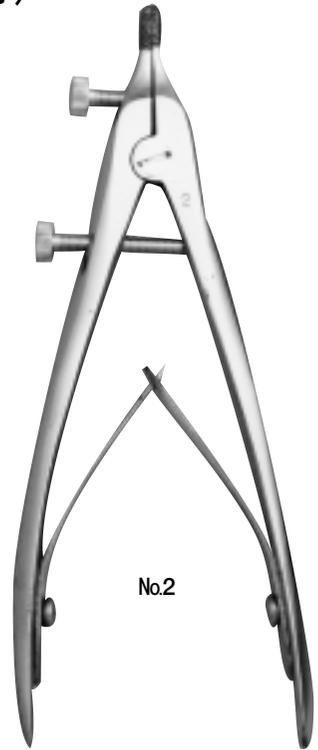

No.2

線鉤クラスペンディングプライヤー BS11(大・小)



No.BS11

全長 大150mm 小130mm

①線をU字に屈曲



②F部で翼部をT字に開く




③GC部で両翼を下方に屈曲




④H部で片翼を上下に屈曲



⑤H部で片翼を内側に屈曲

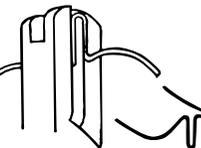

⑥GD部で脚部を屈曲

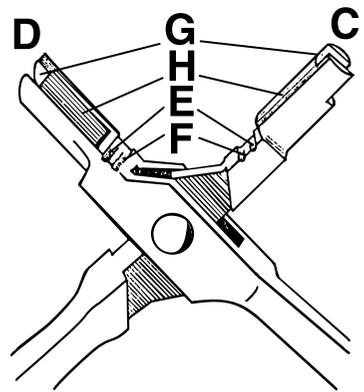

医療機器届出番号 13B3X00365000911

一般の名称 歯科技工用鉗子