



DENKEN-HIGHDENTAL

ハンドピース用高圧蒸気滅菌器(EN13060:ClassS準拠)

CLEAR CLAVE



未包装ハンドピース

最大 **13**^{※1}本・最短 **20**^{※2}分で滅菌完了

大容量の滅菌
チャンバー

スピーディな
滅菌作業

プリオン滅菌
モード搭載

※1 未包装の場合、最大13本のハンドピースの滅菌が可能。滅菌バッグに入れた場合は、最大9本のハンドピースに対応。

※2 常温から134℃で未包装のハンドピースを乾燥工程なしで滅菌し、取り出し可能になるまでの時間。

CLEAR CLAVE

ヨーロッパ基準 EN13060 : Class S に準拠した
高性能ハンドピース用高圧蒸気滅菌器
クリアクレーブ。



Features

■ 大容量チャンバーで最大13本の ハンドピースが滅菌可能

未包装ハンドピースを最大13本まで滅菌可能な大容量の滅菌チャンバーを装備。滅菌バッグに入れたハンドピースなら最大9本まで滅菌することができます。




未包装ハンドピース13本を
収容した状態



滅菌バッグに入れたハンドピース
9本を収容した状態

■ 視認性に優れた操作パネル

滅菌温度、滅菌バッグの有無、乾燥工程の有無の順に条件を設定してスタートボタンを押すだけ。一目で分かる操作パネルは初めての方でも使いやすいデザインです。

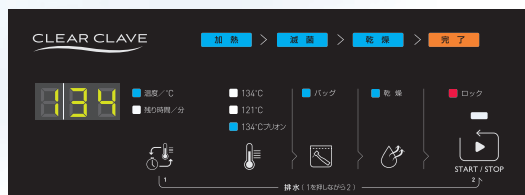

■ 最短20分のスピード滅菌

未包装ハンドピースを134℃・乾燥工程なしで滅菌する場合、20分で取り出すことが可能です。ハイパワーヒーターで滅菌作業の短縮化を実現します。

滅菌温度	滅菌時間 (分)	滅菌バッグ ×なし/●あり	乾燥5分 ×なし/●あり	完了までの時間 (分)
134℃	4	×	×	20
	4	×	●	25
	6	●	×	22
	6	●	●	27
121℃	20	×	×	35
	20	×	●	40
	30	●	×	45
134℃ プリオン モード	30	●	●	50
	18	×	×	34
	18	×	●	34
	18	●	×	39
	18	●	●	39

■ プリオン滅菌モードも備えた高性能

感染症を有する異常プリオンを滅菌するためのモード(134℃18分)を搭載しています。

■ 異常を検知する安全設計

- ・作動中は自動的にフタをロック
- ・温度センサーなど異常をすばやくお知らせする異常監視機能付き

■ 大切なハンドピースに優しい低温乾燥

ハンドピースなどの器具を傷めにくい5分間の低温乾燥が選択可能です。

Product



ハンドピース用高圧蒸気滅菌器

クリアクレーブ

外形寸法	W246×H360×D377mm
チャンバー容量	Φ130×248L(3.3L)
電源電圧	AC100V ±10% 50/60Hz
消費電力	1100VA
安全装置	安全弁、空焚きセンサー 過昇温センサー、ふたロック装置

販売名：クリアクレーブ
管理医療機器(クラスII) 特定保守管理医療機器
認証番号：301AHBZX00010000
一般的名称：小型未包装品用高圧蒸気滅菌器

■ 付属品



滅菌バスケット



バスケット仕切り板

- ・排水チューブ
- ・排水容器
- ・計量カップ
- ・取り出し用フック

※外観・仕様については予告なしに変更する場合があります。

製造販売元 製造販売業 許可番号 26B2X10018

代理店



エア・ウォーターグループ
デンケン・ハイデンタル 株式会社

本社：京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

西日本支店 東日本営業所 九州営業所

☎075-672-2118 ☎03-3969-8000 ☎092-710-5360