

METAL LOCK

メタルロック



「硫黄系モノマー」+「リン酸系モノマー」配合。
貴金属から非貴金属まで幅広く対応可能となりました。



METAL LOCK (メタルロック)


「リン酸系モノマー」を配合。多様な材料との接着が可能

貴金属との接着に有効な成分「硫黄系モノマー」に加え、非貴金属との接着に有効な成分「リン酸系モノマー」を配合することで、義歯の製作・修理から、歯冠修復まで幅広い範囲での使用が可能となっております。



貴金属・非貴金属への接着性

含有した「硫黄系モノマー」の効果により、貴金属・非貴金属に対しても良好な接着強度を得ることが出来ます。

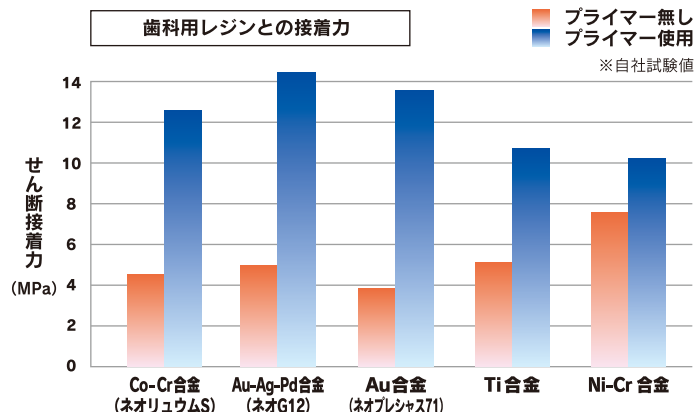

適用対象物

Co-Cr合金	Au-Ag-Pd合金	Au合金	Ti合金	Ni-Cr合金
○	○	○	○	○

操作手順(金属+前装冠用レジン)

被着面を粗造にし、水洗、乾燥を行った後、メタルロックを塗布します。

LEDトレーキュアまたはLEDキュアボックスプラスにて10秒重合。前装冠用レジンの場合、光重合を行うことで接着強度が大幅に上昇します。

各用途に応じたレジン材料の築盛、重合を行います。

操作手順(金属+床用レジン)

被着面を粗造にし、水洗、乾燥を行った後、メタルロックを塗布します。

通法通り、レジン材料を重合します。

商品情報

メタルロック

医療機器認証番号:301AFBZX00035000

管理医療機器
歯科金属用接着材料



内容量	8ml
標準価格	6,000円
(1mlあたりの単価 750円)	

※記載価格には消費税は含まれておりません。 ※価格は予告なく変更する場合があります。

山八歯材最新情報はホームページで... ~健康は歯から~(お問い合わせ・ご質問等もお待ちしております) www.yamahachi-dental.co.jp/

※ご注文・お問い合わせは、お取引ディーラー様にご用命下さい。

5140

●ご用命は...



製造販売元

山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL (0533) 57-7121 FAX (0533) 57-1764

Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp