



だいちゃんシリーズ

だいちゃんシリーズ

貼付式模型台



作業時間 短縮	工数コスト 削減	石膏廃材 削減
------------	-------------	------------



だいちゃん



だいちゃんII



だいちゃん全額用



ブラだいちゃんF



だいちゃんボンド

SSS サンエス石膏株式会社

大阪本社 | 〒564-0063 吹田市江坂町1-23-101 大同生命江坂ビル13F
大阪営業所 | TEL(06)6339-0870(代) FAX(06)6339-0871

東京営業所 | 〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-6 福利久ビル5F
TEL.03-5283-6201 FAX.03-5283-6205

中部営業所 | 〒489-0983 瀬戸市苗場町113
TEL(0561)82-9185(代) FAX(0561)85-4179

福岡営業所 | 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-4-17 第6岡部ビル6F
TEL(092)413-5220(代) FAX(092)413-5222

URL : <http://www.san-esugypsum.co.jp>
E-mail : headquarter@san-esugypsum.co.jp

サンエス石膏

販売元:サンエス石膏株式会社

お問い合わせ・商品のお求めは下記へ

高性能が可能にする作業時間の短縮。 「時間の短縮=コスト削減」を実現。



特長

カンタン作業と精密性能を両立


- 1 ピンを立てる必要がありません。
- 2 維持溝を開ける必要がありません。
- 3 石膏の硬化膨張の影響を受けないので、精密な模型が製作できます。
- 4 作業時間が大幅に短縮します。
- 5 作業時に石膏を使用しないので、産業廃棄物が少なくなります。
- 6 石膏を練る必要がありません。

「作業時間短縮」が実現する「コスト削減性能」

作業時間が短いため生産性の向上が見込めます。また、労働時間が少なくなることで労務費の大幅ダウンも見込めます。作業効率を上げながらコストを削減する「攻めのコストダウン」を可能にします。

だいちゃんII
ダウエルピンを1本増やした事により、適応症例が幅広くになりました

工程の比較 (全顎模型の場合)

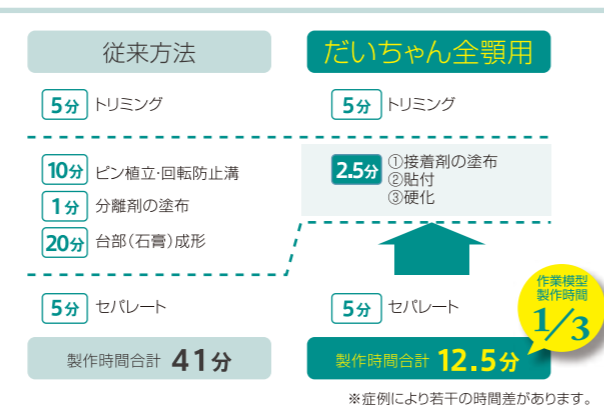

包装

- だいちゃん
1ケース 50個入り(石膏プレート+石膏基台)
- だいちゃんII
1ケース 50個入り(石膏プレート+石膏基台)
- だいちゃん全顎用
1ケース 30個入り(石膏プレート+石膏基台)

使用方法

毎日、補綴物の納期に追われている技工士さんにとって、時間を短縮できれば、どれだけのメリットがあるのでしょうか？
だいちゃんシリーズ(例)を使用すれば、模型製作の時間を大幅に短縮することができます。



1 ゼリー状瞬間接着剤を接着面全面に均等にうすく塗ります。
※だいちゃんボンドを推奨します


2 ピンの立っている位置を確認し、模型をだいちゃん全顎用に貼り付けます。

3 瞬間接着剤の硬化促進剤などを使用し、接着剤の余剰部分から内部へと硬化させていきます。

4 接着剤の硬化を確認し、ノコでセパレートします。

5 完成

新しいスタイルの貼付式模型 ダウエルピンを使わないからセプレート位置、自由自在!

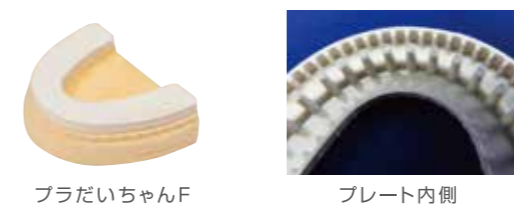

特長

ダウエルピンを使用しない独自の維持方式を採用し、何処からでも切ることができる新しい発想の貼付式模型台です。プレートに熱変形を極力少なくした特殊樹脂を使用しています。

包装

1ケース 30個入り(樹脂プレート+石膏基台)

使用方法



1 歯列模型の底面をトリマーで平滑に切削します。

2 ピン位置を確認し、模型をプラだいちゃんFに貼り付けます。
※だいちゃんボンドを推奨します
※模型を貼り付け、ノコでセパレートしないとはずれません。

3 瞬間接着剤の硬化促進剤などを使用し、接着剤の余剰部分から内部へと硬化させていきます。

4 接着剤の硬化を確認し、ノコでセパレートします。

5 小槌で軽く叩いてはずします。

だいちゃんシリーズ専用の 高性能瞬間接着剤



特長

新しいスタイルの貼付式模型台「だいちゃん」シリーズ専用のゼリー状・瞬間接着剤です。強固な接着力と硬化時間に余裕があるため、作業がしやすくなります。また、たれにくく流れないため、垂直面でも使用できます。

包装

20g×10本入り

ご注意 ※スチーマー等で「だいちゃん」シリーズを洗浄する際は、スチームノズルを3cm以上離して下さい。特に、ピン穴にスチームノズルを密着しての洗浄はしないで下さい。