

AnyCheckで ワンプッシュ チェック



3秒以内に測定完了!

ヒーリングアバットメント
を直接打診

感覚を「見える化」する、インプラント安定性測定器

埋入時や二次手術時などに測定することによって、インプラントの初期固定、
オッセオインテグレーションの度合、インプラントの予後の評価を数値で知ることができます。



動画はこちら



正確!

客観的なインプラント体の安定度をもとに荷重時期を見極められます。



早い!

対象物に直接接触させて1.5秒で安定度を読み取ります。



簡単!

ヒーリングアバットメントや補綴物などを外さずにすぐ測定できます。



安全!

測定時に安定度が極めて低い場合、2度打診して自動停止します。




医療機器認証番号：231AFBZ100007000


AnyCheck

AnyCheckはインプラント体の安定性及び天然歯の動揺度を測定する器具です。タッピングモーションにより歯槽骨とインプラント界面の剛性を測定し数値化 (IST値) します。IST値を参考に荷重時期の計画を立てることによって、インプラント喪失のリスクを低減することができます。

使用方法

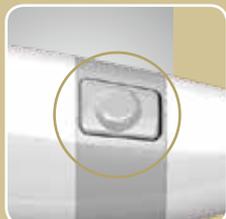

1. 電源ボタンを押します。
2. ヒーリングアバットメント上部へタッピングロッドをわずかに接触させます。このとき、ヒーリングアバットメントを押さないようご注意ください。
3. 接触角度を0～30度以内に調整します。
4. 本体を保持しながらスタートボタンを軽く押します。
5. IST値が1～99の範囲で液晶スクリーンに表示されます。数値が高いほど、安定性が高いことになります。

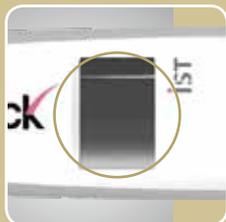

AnyCheck の動画はこちらから



注文書

FAX **06-6321-8522**

注文書に必要事項をご記入のうえ、営業担当者に直接お渡しいただくか、ファックスにてお送りください。

貴医院名			
お名前			
ご住所	〒		
TEL		FAX	

商品コード	商品名	価格(税別)	数量
A0984	AnyCheck -エニーチェック-	480,000 円	

営業担当者記入欄

得意先コード	
担当者名	
通信欄	

お問い合わせはこちらまで