

歯科材料 03 義歯床材料
一般医療機器 歯科用パターンレジン JMDN 70833000

DH Print キャスト

【禁忌・禁止】

メタクリル酸エステルモノマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理】

形状: 液体状

色調: レッド

成分: メタクリル酸エステルモノマー、その他

原理: 本品は、3Dプリンタを用いて造形し、光重合により硬化する。

【使用目的又は効果】

インレー、クラウン等鑄造用パターンの作製に用いる材料である。

【使用方法等】

1. 本品を上下に十分に振ります。
2. 適用する3Dプリンタ(波長: 405 nm)のレジントレーに本品を注ぎ入れます。
3. 3Dプリンタの取説に従ってあらかじめ設計した造形データを読み込み、適切な造形プログラムを設定し、造形を開始します。
4. 造形が完了した後、スクレーパー等を用いてプリンタの造形テーブルより造形物を取り外します。必要に応じて造形物よりサポート部を外します。
5. 造形物表面の未硬化部分を取り除くため、イソプロパノールに浸漬し、超音波洗浄機で洗浄します。(1次洗浄2分、2次洗浄2分、必要に応じて柔らかいブラシ等をご使用下さい)。
6. 造形物にエアを吹きかけ、イソプロパノールを十分に揮発させ未硬化部分が残っていないことを確認します。
7. 405 nmの光重合機を用いて5分間、二次硬化を行います。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ・18~30℃の環境下で使用すること。造形時のインク温度が常温でない場合、造形精度に影響を与える恐れがあるため、造形前に25℃付近に2時間以上保管して使用すること。
- ・本品は環境光(日光や蛍光灯)の影響を受けるため、3Dプリンタのレジントレーに注ぐなど、取扱の際は出来るだけ光が当たらないように素早く行うこと。また、ボトル使用後は直ちにキャップを閉めること。
- ・上記3~4の造形を連続して行う際はトレー内に硬化物破片などが残っていないことを十分確認すること。
- ・使用中のトレーを一時保管の際は環境光を遮光すること。また一晩放置せず出来るだけ使い切ること。
- ・造形作業の際は適切な保護具(ニトリルグローブ、保護マスク等)を着用すること。
- ・二次硬化は残留モノマーを低減し、造形物の機械的物性向上、に不可欠な工程であるため必ず実施すること。また、色調変化や変形の原因となるため、適切な条件で実施すること。

【使用上の注意】

〔使用上の注意〕

- ・本品は【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本品は歯科医療有資格者以外が使用しないこと。

〔重要な基本的注意〕

- ・イソプロパノールで造形物を洗浄する場合など、アルコールによる人体の影響を避けるため、適切な換気を行い、適切な保護具(ニトリルグローブ、保護マスク等)を着用すること。
- ・本品又は本品に含まれる成分に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、本品の使用により過敏症状を起こした場合には直ちに使用を中止し、専門医の診察を受けること。
- ・本品は、目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに使用を中止し、眼科医の診察を受けること。
- ・本品は皮膚に付着しないように注意すること。万が一皮膚に付着した場合には、直ちに多量の流水と石鹸で洗浄し、専門医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・火気、高温、多湿を避けて暗所で保管すること。
- ・歯科医療従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔有効期間〕

- ・本品は包装に記載されている使用期限までに使用すること。(使用期限は当社データによる。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

* 住 所: 〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

* 電話番号: 075-672-2118

製 造 元: デンケン・ハイデンタル株式会社